

ポジクッション®

やさしいポジショニング

ポジクッション



ポジクッションT (耐熱タイプ)




商品選びのご参考

介護現場にも分かりやすい、やさしいポジショニング

- 身体をクッションで支えることで、拘縮・変形のある方でも安楽に休んでいただけます。
- 四肢・体幹・頸部のアライメントを整え、安心・安楽な体位づくりを支援します。
- 褥瘡予防・拘縮／変形予防・筋緊張の緩和・呼吸の改善・活動の向上など

使用例



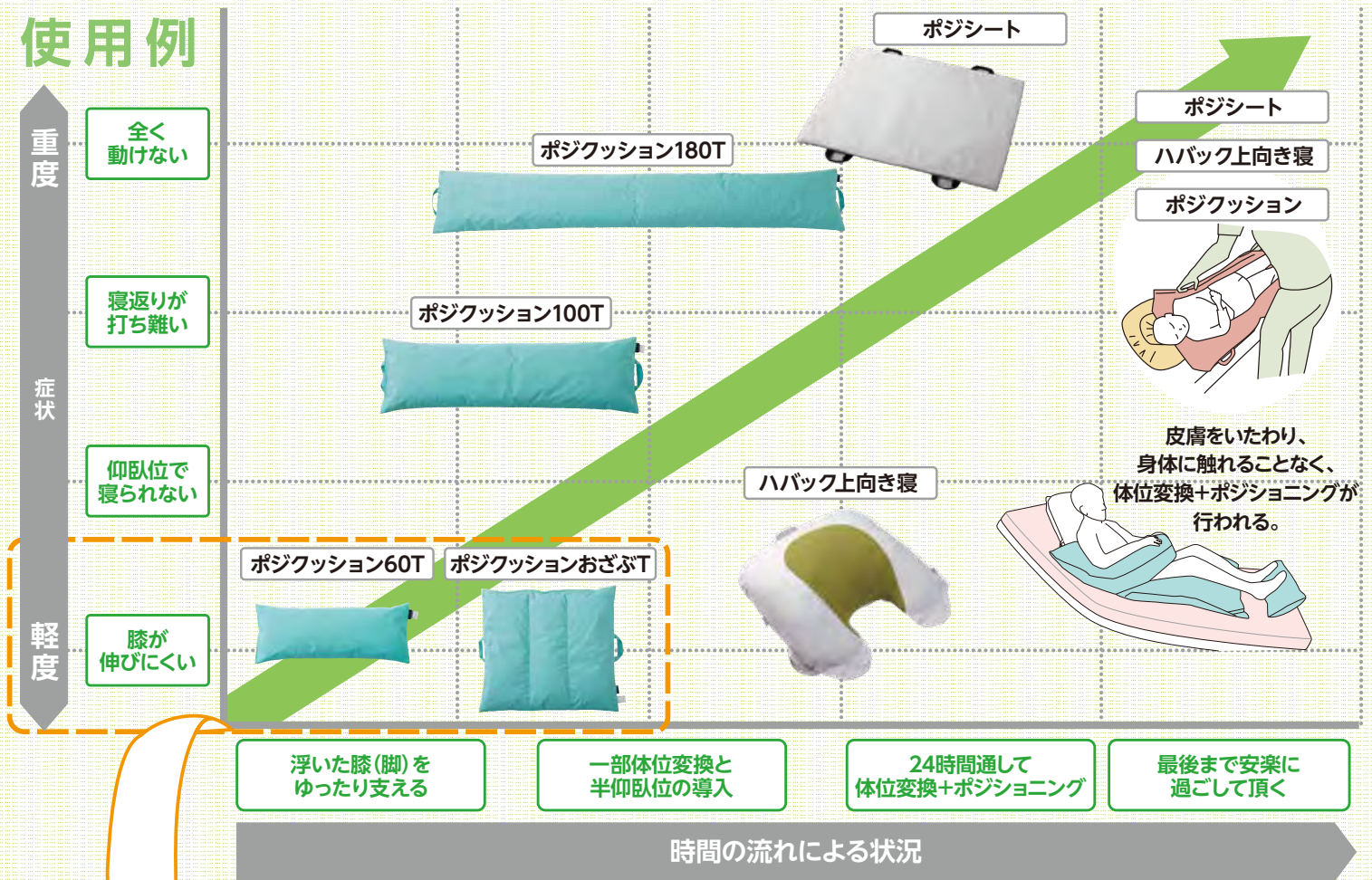


やすらぎと、楽しさと、健康のために、社会貢献をめざしています。

ポジショニング実施前

ポジショニング実施直後

膝が痛い場合

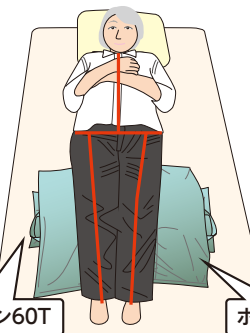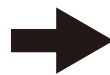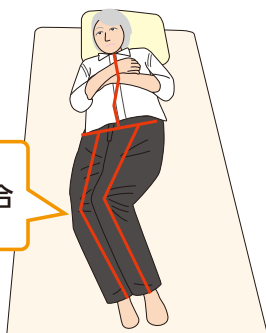

軽度からのご使用がオススメです

膝が曲がった状態で固まる(拘縮)と、次第に骨盤や背骨まで傾き、ねじれてしまうことがあります。

ポジクッション60T

ポジクッションおざぶT

特長

特長 1 日本の高齢者の体格に合わせた形状とサイズから 現代の日本人 男女問わず適したサイズを2種類ラインアップ

※ 参考資料: 日本人身長計測データ

特長 2 中素材は、動いて押せば安定 【特許登録 第5762727号】




流動性と安定感を確保!

流動性がありながら、押せば安定する。特殊開発素材「ナジーム®」+ビーズ

細かくウレタンを特殊加工した【ナジーム】とビーズを混ぜ合わせることで、振れば自由に動き、押せば素材同士が絡み合い形状を安定させます。

素材の変形量や弾力性を吟味して、心地よさを追求しました。


圧縮試験の結果【硬さ40% (N)】

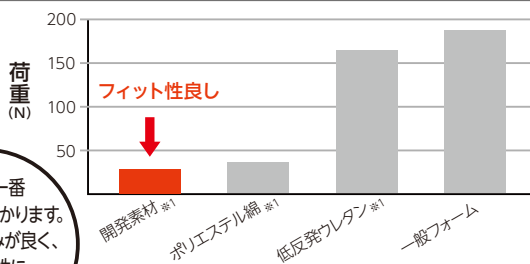

反発が一番少ない事がわかります。これは馴染みが良く、フィット性に優れている証です。

圧縮試験の結果【硬さ40% (N)】

圧縮試験の結果【最大荷重 (N)】

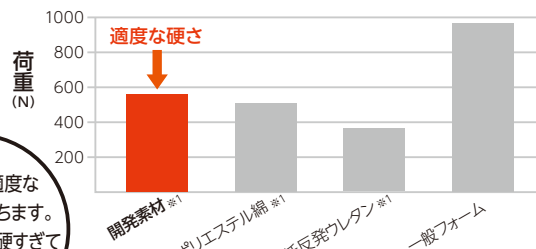

底付かず、適度な柔らかさを保ちます。ビーズ単体では硬すぎて縫製が裂けました。

圧縮試験の結果【最大荷重 (N)】

※1 グラフは、静岡県工業技術研究所 平成25年度工技企第1-47号の数値により作成 一般フォームは自社測定
※2 ポジクッション・ピンク色タイプのデータ値です。グリーン色は、ピンク色のデータ触感に合わせて配合しています。

特長 3 体圧が分散され、姿勢もよくなる

身体をクッションで支えることで、拘縮・変形のある方でも安楽に休んでいただけます。

クッションなし



ねじれる


ポジクッションあり



ひろがる

※ ポジクッション・ピンク色での測定値です。被験者: 女性145cm、45kg

特長 4 表生地は、ポジショニングに適した摩擦力

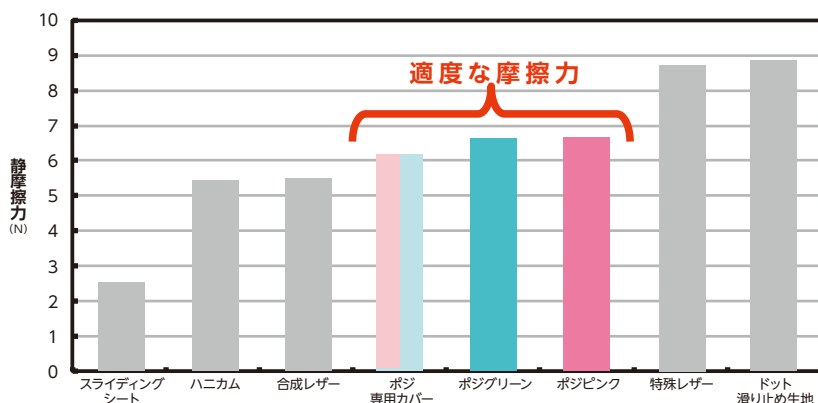







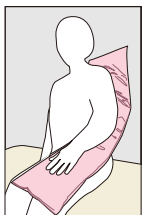
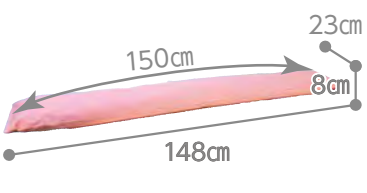
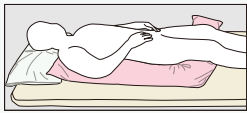
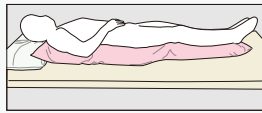
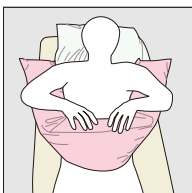
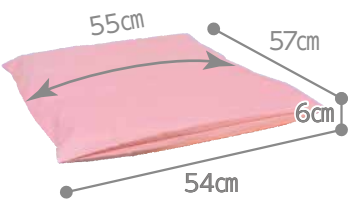
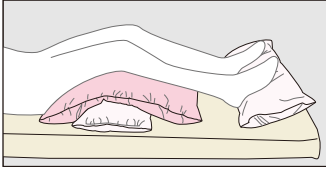
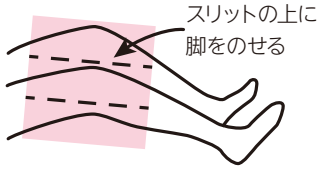
表面生地の摩擦力試験データ

身体がのった際に、滑り過ぎず引っ掛かり過ぎない適度な摩擦力で安定します。

商品ラインナップ - 1

ピンク色


小柄な方向け

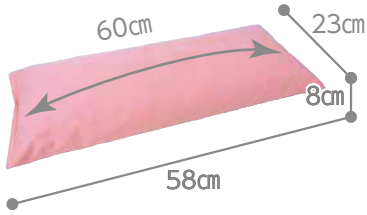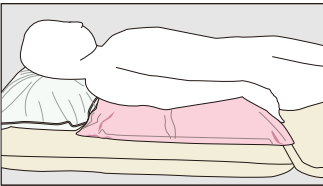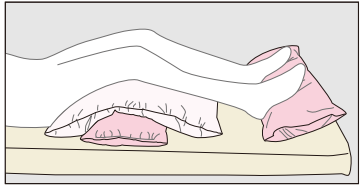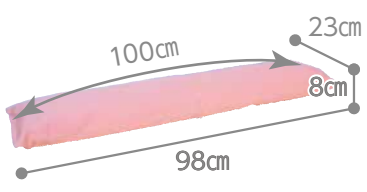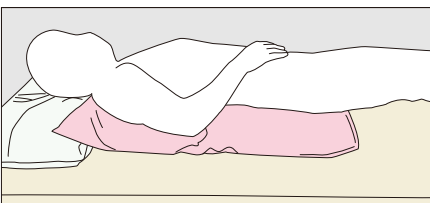品名	サイズ	使用例
ポジクッション 60	24×60cm  介助者レベル 初級～上級	人気ナンバー1の形状で、様々な部位にフィットします  腕置き  膝下 足底(尖足予防)
ポジクッション 100	24×100cm  介助者レベル 初級～上級	ユーザー様からの圧倒的支持  半側臥位 頸部～腰  腕置き  肩～指先まで
ポジクッション 150	24×150cm  介助者レベル 初級～上級	一本のクッションを軸に体幹を整えます  L字で使用  I字で使用 仙骨を浮かしてあげる  上肢
ポジクッション おざぶ	55×59cm  介助者レベル 初級～上級	下肢のポジショニングに最適 伸びにくい膝を安定させることで身体全体が安楽になる！  坐骨手前～下肢  スリットの上に脚をのせる

モデル身長 150cm

〔仰臥位〕

〔半仰臥位〕

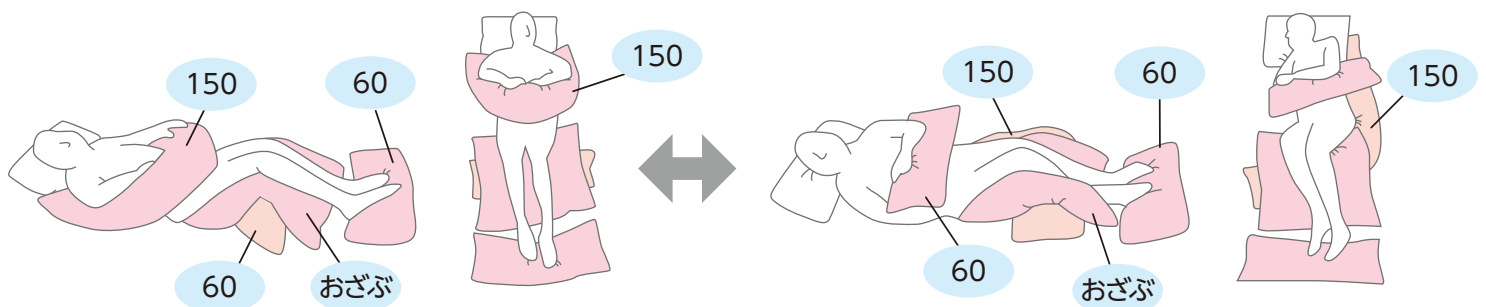


商品ラインナップ - 2

グリーン色 (耐熱タイプ)

現代の日本人の体格をカバーできるサイズ展開


品名	サイズ	使用例
ポジクッション 18T	18×40cm 介助者レベル 初級～上級	どんな腕の太さでも安定 腕置き 車椅子の肘あて <ul style="list-style-type: none">・クッションや枕のアンカー・身体と車椅子やベッドの隙間埋め
ポジクッション 60T	24×60cm 介助者レベル 初級～上級	人気ナンバー1の形状で、様々な部位にフィットします 腕置き 膝下 足底 (尖足予防)
ポジクッション 100T	30×100cm 介助者レベル 初級～上級	ふくよかな方も支えられます 半側臥位 肩～腰 肩～指先まで
ポジクッション 180T	30×180cm 介助者レベル 中級～上級	一本で体幹を整えます 中素材を均す 身体に中素材を合わせる リラックス
ポジクッション おざぶT	59×63cm 介助者レベル 初級～上級	下肢のポジショニングに最適 坐骨手前～下肢 スリットの上に脚をのせる
ポジクッション 80角T	80×80cm 介助者レベル 初級～上級	用途多様、大判サイズ ゆったり下肢をのせる 高さ 約30cm 形状の変化

モデル身長 170cm

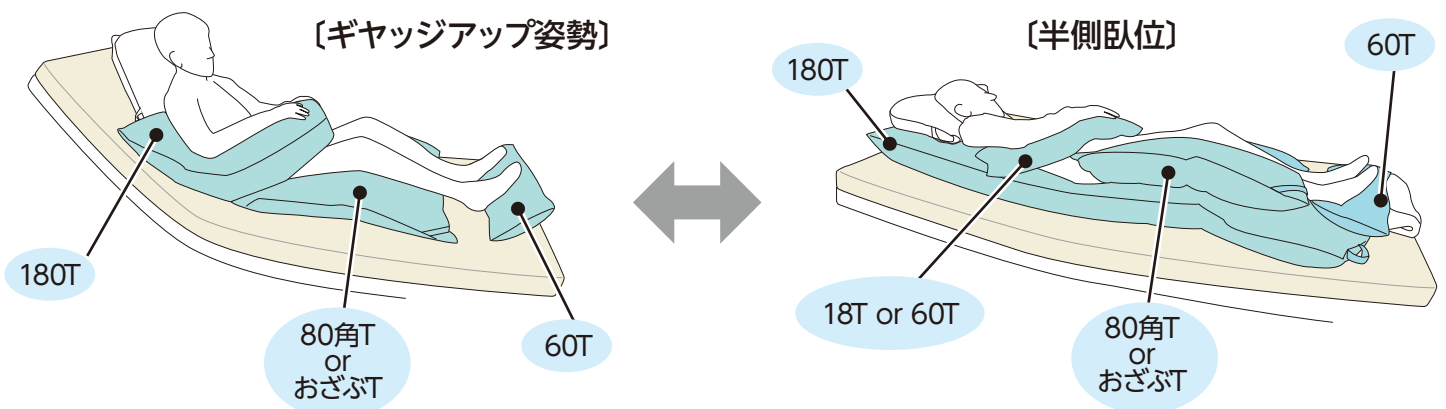

比較

比較 1 サイズが少し異なります

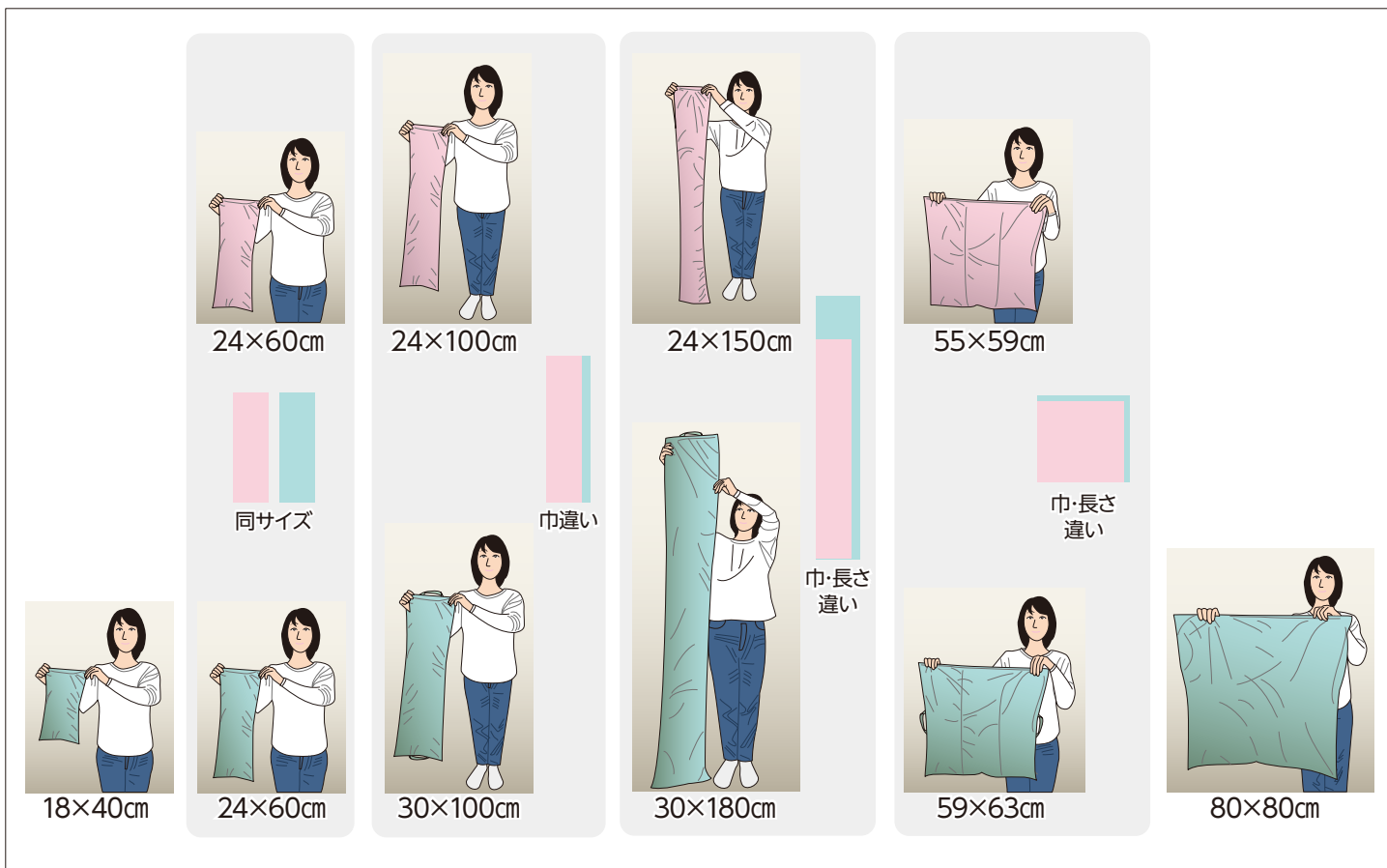

モデル身長 153cm

比較 2 自宅でのお洗濯が可能

ピンク色	温水40℃以下、乾燥機は80℃まで対応	洗濯 40℃	乾燥 80℃
グリーン色 (耐熱タイプ)	温水95℃以下、乾燥機は100℃以下、オートクレーブ105℃まで対応	洗濯 95℃	乾燥 100℃

比較 3 体位変換器として、ポジクッション100T、180T、おざぶT、80角Tが対象になっています

ピンク色	体位変換器ではございません		
グリーン色 (耐熱タイプ)	100T 	180T 	おざぶT
	80角T 		
	・取っ手が付いています		介護保険:福祉用具貸与(体位変換器)

専用カバー

形状は、ファスナーを使わない、かぶせ式で全体をカバーします

両側かぶせ式 ポジクッション100、150、ポジクッション100T、180T

ポジクッション100T専用カバーの場合



片側かぶせ式 ポジクッション60、おざぶ、ポジクッション18T、60T、おざぶT、80角T

ポジクッションおざぶ専用カバーの場合



生地の特長

肌にふれた時、とてもなめらかでシルクよりさらに、やさしい感触です。ムレやベタつき感を抑え、「吸放湿性能」に優れ、さらに、静電気を素早く逃がします。

ストレッチ生地でセッティングしやすく、中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」が特長です。

<お洗濯>



吸湿・放湿・吸汗・速乾・UV

本体に合わせたお色を準備しています。



〔監 修〕 社会福祉法人 五十鈴会
介護老人福祉施設 五十鈴荘
〔技術協力〕 静岡県工業技術研究所
ファルマバレーセンター

製造販売元

株式会社丸井商事／ラクデス

〒424-0045静岡県静岡市清水区東大曲町4-18

TEL.054-366-1612 FAX.054-366-1738

ホームページ： <https://www.rakudes.com/>

日本製

ラクデス クッション

検 索

